

Alkacide®

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL
NO REQUIERE ACTIVADOR NI TIRILLAS DE VERIFICACIÓN

Desinfección de alto nivel de dispositivos médicos semicríticos, material quirúrgico, médico, dental, equipos termosensibles y componentes de equipos biomédicos que puedan ser desinfectados mediante inmersión. Utilizado en lavado manual y automático.

BENEFICIOS

- Efecto de acción inmediata, bactericida, viricida, fungicida, tuberculicida, esporicida.
- **Alkacide®** cuenta con un indicador de color que le informará cuando debe ser renovada la solución.
- Rendimiento total de 50 litros.

COMPOSICION

Alkacide® concentrado contiene: Glutaraldehído potencializado al 10.5% (8.5 glutaraldehído + 2% tensoactivo catiónico).

Alkacide® diluido al 2% en la solución de uso, contiene solo 0.17% de glutaraldehído.

PRECAUCIONES GENERALES

Los recipientes que contengan la solución preparada de **Alkacide®** lista para usarse, deberán mantenerse cubiertos para evitar derrames y contaminaciones.

Consulte la hoja de seguridad en www.hecar.com.mx

SEGURIDAD DEL PRODUCTO PREPARADO



Tóxico
Irritante



No corrosivo
No mancha



Utilizar elementos de
protección personal



Uso hospitalario



Producto amigable con
el ambiente y
biodegradable.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco de 1L con dosificador integrado

INSTRUCCIONES DE USO

Ver al respaldo.

REGISTRO SANITARIO:

No. 1556C95SSA

PROPIEDADES MICROBIÓLOGICAS

ACTIVIDAD	ENSAYO	MICROORGANISMO	TIEMPO DE CONTACTO
BACTERICIDA	EN 1040	Pseudomonas aeruginosa (0.1%), Staphylococcus aureus (0.1%)	15 MINUTOS
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa (0.25%), Staphylococcus aureus (0.075%), Enterococcus hirae (0.075%)	15 MINUTOS
	NF T 72-171	Pseudomonas aeruginosa (0.5%), Staphylococcus aureus (0.125%), Escherichia coli (0.1%), Enterococcus hirae (0.125%)	15 MINUTOS
	NF T 72-281	Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) al 2%, Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem (PAR) al 2%	15 MINUTOS
	NF T 72-301	Mycobacterium tuberculosis (5%)	15 MINUTOS
FUNGICIDA		Mycobacterium smegmatis (0.5%), Mycobacterium tuberculosis (2%), Mycobacterium avium (5%)	15 MINUTOS
	EN 1275	Candida albicans (0.5%), Aspergillus niger (5%)	15 MINUTOS
	NF T 72-301	Candida albicans (0.125%), Penicillium verrucosum (1%), Cladosporium cladosporioides (0.25%), Aspergillus fumigatus (2%)	15 MINUTOS
	AOAC 955.15	Candida auris CDCB11903 (2%) - (3%) - (4%). Aspergillus brasiliensis ATCC16404 (2%) - (3%) - (4%).	15 MINUTOS
VIRUCIDA	EN 14476	Adenovirus, Norovirus, Hepatitis B, Hepatitis C	15 MINUTOS
	NF T 72-180	VIH-1 (0.5%)	15 MINUTOS
	EUCAST 2011	Morbillivirus (ATCC CCL - 34) Paramyxoviridae (0.05%)	5 MINUTOS
	CLSI 2012	Parvovirus (ATCC VR - 2209) Parvoviridae (0.05%)	5 MINUTOS
	EN 14476	Poliovirus type 1	5 MINUTOS
	EN 14476+A1	Herpes virus tipo 1 y Rotavirus Cepa Wa (1%)	15 MINUTOS
ESPORICIDA	NF T 72-230	Bacillus subtilis var niger (5%)	15 MINUTOS
	EN 14347	Bacillus subtilis, Bacillus cereus (5%)	15 MINUTOS

Alkacide® INSTRUCCIONES DE USO



1.

Agregue 1L de agua a un recipiente limpio y con tapa.



2.

Presione el frasco de **Alkacide®** por los costados hasta llenar la cámara dosificadora con 20 mL.



3.

Vierta el contenido del dosificador (20 ml) en el recipiente con agua.



4.

Después de la limpieza con **Alkazyme®**, seque y sumerja completamente los dispositivos en la solución de **Alkacide®** y deje actuar durante 15 minutos.



5.

Enjuague con abundante agua potable, transcurrido el tiempo de inmersión.



6.

Proceda con el secado de las piezas y manipule con técnica de esterilidad para conservar este método.

CONSIDERACIONES DE USO

- Los dispositivos médicos, material, entre otros, que hayan sido previamente lavados y descontaminados con **Alkazyme**®, deben estar abiertos, desmontados y secos antes de ser sumergidos en la solución de trabajo de **Alkacide**®.
- Fórmula compatible con la mayoría de los aceros inoxidables (304, 316), PVC, polietileno, polipropileno, teflón, hule, silicona, vidrio.
- Evitar contacto con metales no resistentes a soluciones alcalinas fuertes como aluminio, latón, cobre (en concentraciones altas o tiempos de contacto prolongados). En caso de duda, realizar una prueba en un área discreta.
- La solución preparada de **Alkacide**® es reutilizable y tiene una duración máxima de 30 días bajo las condiciones de almacenamiento y conservación ideales. Debe ser reemplazada inmediatamente si presenta turbidez, cambio en la coloración o cuando sea necesario.
- Una vez terminado el producto, enjuague el recipiente de **Alkacide**® con abundante agua estéril, destilada o potable.
- Puede eliminar la solución preparada de **Alkacide**® como un desecho ordinario una vez que se haya neutralizado con glicina o según las regulaciones indicadas de cada región.